

STOMATOLOGICKÉ SOUPRAVY **BOHEMIA 501**

BOHEMIA 501 Mini

Je vybavena kruhovým operačním svítidlem, pěti-nástrojovým stolkem na pantografu s pneumatickou brzdou a **otočným plivátkovým blokem** se skleněným plivátkem. Plivátkový blok je dále osazen zásobní lahví na destilovanou vodu pro chlazení nástrojů a pneumatickým odsliňovačem. Toto provedení není vybaveno separátorem amalgamu – je ale možné soupravu doplnit o externí separátor – např. sedimentační separátor Skantech (viz příslušenství). Souprava je v tomto provedení připravena pro připojení třicístné stříkačky (v ceně), světelné nebo nsvětelné turbínové hadice (v ceně je započtena nsvětelná hadice Midwest 4), světelného nebo nsvětelného mikromotoru (viz doplňkové vybavení) a odstraňovače zubního kamene nebo druhé turbíny. Maximální počet nástrojů na stolku je pět, elektricky ovládané jsou tři.

Stomatologické křeslo Chirastar 401 má naprogramované dvě polohy – polohu nasedací a polohu vyplachovací. Lze jej rozšířit o programovací jednotku. Ta je součástí kompletu fóliových klávesnic (viz doplňkové vybavení).

Souprava obsahuje:

- Stolek lékaře pěti-nástrojový s dolním vedením hadic osazený stříkačkou a turbínovou hadicí Midwest
- Otočný plivátkový blok s pneumatickou brzdou
- Pantografické rameno stolku s pneumatickou brzdou
- Pantografické rameno světla
- Halogenové operační světlo malé 98010
- Skleněné plivátko
- Pneumatický odsliňovač se sací hubicí Ø6
- Křeslo Chirastar 401 s bezešvým čalouněním
- Multifunkční nožní spínač pro ovládání křesla i soupravy
- Možno dokompletovat separátorem amalgámu Skantech
- Možnost volby stolku s horním vedením hadic (viz doplňkové vybavení)
- Volitelné osazení nástrojů, libovolné pořadí nástrojů

BOHEMIA 501 Ekonom

Je osazena kruhovým operačním svítidlem, pěti-nástrojovým stolkem na pantografu s pneumatickou brzdou a **otočným plivátkovým blokem** se skleněným plivátkem. Součástí plivátkového bloku je i panel výkonné odsávačky s hubicemi pro odsliňovač prům. 6 mm a hubicí pro odsávací koncovky prům. 11 mm. Souprava je osazena pneumatickou vývěvou jako zdrojem podtlaku pro výkonnou odsávačku. **Není tedy třeba soupravu vybavit výkonnou odsávačkou.**

Toto provedení není vybaveno separátorem amalgamu – je ale možné soupravu doplnit o externí separátor – např. sedimentační separátor Skantech (viz příslušenství). Souprava je v tomto provedení připravena pro připojení třicístné stříkačky (v ceně), světelné nebo nsvětelné turbínové hadice (v ceně je započtena nsvětelná hadice Midwest 4), světelného nebo nsvětelného mikromotoru (viz doplňkové vybavení) a odstraňovače zubního kamene nebo druhé turbíny. Maximální počet nástrojů na stolku je pět, elektricky ovládané jsou tři.

Stomatologické křeslo Chirastar 401 má naprogramované dvě polohy – polohu nasedací a polohu vyplachovací. Lze jej rozšířit o programovací jednotku. Ta je součástí kompletu fóliových klávesnic (viz doplňkové vybavení).

Souprava obsahuje:

- Stolek lékaře pěti-nástrojový s dolním vedením hadic osazený stříkačkou a turbínovou hadicí Midwest
- Otočný plivátkový blok s pneumatickou brzdou
- Pantografické rameno stolku s pneumatickou brzdou
- Pantografické rameno světla
- Halogenové operační světlo malé 98010
- Skleněné plivátko
- Místo pro asistenta s odsliňovačem a odsávacími hubicemi Ø6 a Ø11

- Sada koncovek pro výkonnou odsávačku Cattani
- Výkonná pneumatická vývěva
- Křeslo Chirastar 401 s bezešvým čalouněním
- Multifunkční nožní spínač pro ovládání křesla i soupravy
- Možno dokompletovat: separátorem amalgámu Skantech
- Volitelné osazení nástrojů, libovolné pořadí nástrojů
- Možnost volby stolku s horním vedením hadic (viz doplňkové vybavení)
- Možnost osazení kompletem foliových klávesnic na stolku lékaře a plivátkovém bloku (viz doplňkové vybavení)

BOHEMIA 501 Lux

Je osazena velkým kruhovým operačním svítidlem, pěti-nástrojovým stolkem na pantografu s pneumatickou brzdou a **otočným plivátkovým blokem** se skleněným plivátkem. Součástí plivátkového bloku je i panel výkonné odsávačky s hubicemi pro odsliňovač prům. 6 mm a hubicí pro odsávací koncovky prům. 18 mm.

Souprava je osazena odlučovačem vlhkosti Cattani a je nutno ji dokompletovat externí výkonnou odsávačkou (viz doplňkové vybavení).

Toto provedení není vybaveno separátorem amalgámu – je ale možné soupravu doplnit o externí separátor – např. sedimentační separátor Skantech (viz příslušenství). Souprava je v tomto provedení připravena pro připojení třícestné stříkačky (v ceně), světelné nebo nsvětelné turbínové hadice (v ceně je započtena nsvětelná hadice Midwest 4), světelného nebo nsvětelného mikromotoru (viz doplňkové vybavení) a odstraňovače zubního kamene nebo druhé turbíny. Maximální počet nástrojů na stolku je pět, elektricky ovládané jsou čtyři.

Stomatologické křeslo Chirastar 401 má naprogramované dvě polohy – polohu nasedací a polohu vyplachovací. Lze jej rozšířit o programovací jednotku. Ta je součástí kompletu fóliových klávesnic (viz doplňkové vybavení).

Souprava obsahuje:

- Stolek lékaře pěti-nástrojový s dolním vedením hadic osazený stříkačkou a turbínovou hadicí Midwest
- Otočný plivátkový blok s pneumatickou brzdou
- Pantografické rameno stolku s pneumatickou brzdou
- Pantografické rameno světla
- Halogenové operační světlo velké 98011
- Skleněné plivátko
- Místo pro asistenta s odsliňovačem a odsávacími hubicemi Ø6 a Ø18
- Sada koncovek pro výkonnou odsávačku Cattani
- Odlučovač vlhkosti Cattani
- Křeslo Chirastar 401 s bezešvým čalouněním
- Multifunkční nožní spínač pro ovládání křesla i soupravy
- Možno dokompletovat: separátorem amalgámu Skantech
- Volitelné osazení nástrojů, libovolné pořadí nástrojů
- Možnost volby stolku s horním vedením hadic (viz doplňkové vybavení)
- Možnost osazení kompletem foliových klávesnic na stolku lékaře a plivátkovém bloku (viz doplňkové vybavení)

BOHEMIA 501 Profesional

Je osazena velkým kruhovým operačním svítidlem, pěti-nástrojovým stolkem na pantografu s pneumatickou brzdou a **otočným plivátkovým blokem** se skleněným plivátkem. Toto provedení je osazeno **fóliovou klávesnicí** na stolku lékaře pro ovládání a programování křesla, napouštění sklenky, oplachu plivátka a ovládání světla. Součástí plivátkového bloku je i panel výkonné odsávačky s hubicemi pro odsávací koncovky prům. 11 a 18 mm, třícestnou stříkačkou a také fóliovou klávesnicí pro ovládání křesla, plnění sklenky a oplachu plivátka.

Souprava obsahuje separátor amalgámu Dürr a je nutno ji dokompletovat externí výkonnou odsávačkou (viz doplňkové vybavení).

Nástrojové vybavení je plně volitelné – soupravy lze osadit všemi běžnými stomatologickými nástroji na základě objednávky. Maximální počet elektricky ovládaných nástrojů: stolec lékaře 5, místo asistenta 2. Soupravy jsou vybaveny turbínovou hadicí Midwest4 a třícestnou stříkačkou (v ceně).

Souprava obsahuje:

- Stolek lékaře pěti-nástrojový s dolním vedením hadic osazený stříkačkou a turbínovou hadicí Midwest
- Otočný plivátkový blok s pneumatickou brzdou
- Pantografické rameno stolku s pneumatickou brzdou
- Pantografické rameno světla
- Halogenové operační světlo velké 98011
- Skleněné plivátko
- Místo pro asistenta s odsliňovačem a odsávacími hubicemi Ø11 a Ø18
- Sada koncovek pro výkonnou sačku Cattani
- Křeslo Chirastar 401 s bezešvým čalouněním
- Multifunkční nožní spínač pro ovládání křesla i soupravy
- Komplet foliových klávesnic na stolku a plivátkovém bloku pro řízení a programování křesla
- Nutno dokompletovat externí výkonnou odsávačkou nebo připojit ke zdroji výkonného sání
- Volitelné osazení nástroji, libovolné pořadí nástrojů
- Možnost volby stolku s horním vedením hadic (viz doplňkové vybavení)

Varianta souprav BOHEMIA 501	Mini	Ekonom	Lux	Profesional
Horní vedení hadic	za doplatek	za doplatek	za doplatek	za doplatek
Počet elektricky ovládaných nástrojů na stolku	3	3	4	5
Počet elektricky ovládaných nástrojů na místě asistenta	x	x	x	2
Foliové klávesnice na stolku a místě asistenta	za doplatek	za doplatek	za doplatek	•
Programovatelné křeslo	za doplatek	za doplatek	za doplatek	•
Otočný plivátkový blok s pneumatickou brzdou	•	•	•	•
Pantografické rameno stolku s pneumat. brzdou	•	•	•	•
Pantografické rameno světla	•	•	•	•
Operační světlo malé 98010	•	•	x	x
Operační světlo velké 98011	x	x	•	•
Skleněné plivátko	•	•	•	•
Pneumatický odsliňovač se sací hubicí průměr 6mm	•	•	•	x
Pneumatická vývěva s hubicí průměr 11	x	•	x	•
Výkonná sačka průměr 18mm, nutno dokompletovat externí výkonnou odsávačkou	x	x	•	•
Sada koncovek pro výkonnou odsávačku	x	•	•	•
Odlučovač vlhkosti Cattani	x	x	•	x
Separátor amalgámu	za doplatek „Skantech“	za doplatek „Skantech“	za doplatek „Skantech“	• „Durr“
Multifunkční nožní spínač	•	•	•	•

DOPLŇKOVÉ VYBAVENÍ

Záměna spodního vedení hadic za horní

Komplet foliových klávesnic pro soupravu Mini, Ekonom a Lux

Záměna malého operačního světla za velké u Mini a Ekonom

Záměna malého stolku spodního vedení za velký

Separátor amalgamu Dürr

Separátor amalgamu Skantech

Odlučovač vlhkosti Cattani

Konzole pro snížení plivátka u soupravy pro děti

Přidání turbínové hadice Midwest

Přidání turbínové hadice Midwest světelné

Přidání motorové hadice nesvětelné

Přidání motorové hadice světelné

Přidání mikromotoru P2ED 460 s hadicí

Přidání mikromotoru světelného Bien Air s hadicí

Osazení soupravy OZK Amdent

Osazení soupravy OZK Woodpecker

Osazení soupravy OZK a polymerizační LED lampou Woodpecker

Přidání stříkačky na blok plivátka

Přidání pravé opěrky křesla

Přídavný tácek na rameno světla

Kovový pojezd stolku (oddělení stolku od soupravy)

Výkonná odsávačka agregát DO2.1S

Kompresor DK50S

Komplet intraorální kamery s výstupem USB pro uložení dat (včetně monitoru a držáku)

Záměna křesla Chirastar 401 za křeslo Promed AG03

Záměna křesla Chirastar 401 za křeslo Promed AG04

Záměna křesla Chirastar 401 za křeslo Promed Cobra