

STOMATOLOGICKÉ SOUPRAVY **BOHEMIA** 501

BOHEMIA 501 Mini

Cena včetně DPH zahrnuje stomatologické křeslo Chirastar: **159 900,- Kč**

Je vybavena kruhovým operačním svítidlem, pěti-nástrojovým stolkem na pantografu s pneumatickou brzdou a **otočným plivátkovým blokem** se skleněným plivátkem. Plivátkový blok je dále osazen zásobní lahví na destilovanou vodu pro chlazení nástrojů a pneumatickým odsliňovačem. Toto provedení není vybaveno separátorem amalgamu – je ale možné soupravu doplnit o externí separátor – např. sedimentační separátor Skantech (viz příslušenství). Souprava je v tomto provedení připravena pro připojení třícestné stříkačky (v ceně), světelné nebo nesevětelné turbínové hadice (v ceně je započtena nesevětelná hadice Midwest 4), světelného nebo nesevětelného mikromotoru (viz doplňkové vybavení) a odstraňovače zubního kamene nebo druhé turbíny. Maximální počet nástrojů na stolku je pět, elektricky ovládané jsou tři.

Stomatologické křeslo Chirastar má naprogramované dvě polohy – polohu nasedací a polohu vyplachovací. Lze jej rozšířit o programovací jednotku. Ta je součástí kompletu fóliových klávesnic (viz doplňkové vybavení).

Souprava obsahuje:

- Stolek lékaře pěti-nástrojový s dolním vedením hadic osazený stříkačkou a turbínovou hadicí Midwest
- Otočný plivátkový blok s pneumatickou brzdou
- Pantografické rameno stolku s pneumatickou brzdou
- Pantografické rameno světla
- Halogenové operační světlo malé 98010
- Skleněné plivátko
- Pneumatický odsliňovač se sací hubicí Ø6
- Křeslo Chirastar s bežešvým čalouněním
- Multifunkční nožní spínač pro ovládání křesla i soupravy
- Možno dokompletovat separátorem amalgámu Skantech
- Možnost volby stolku s horním vedením hadic (viz doplňkové vybavení)
- Volitelné osazení nástrojů, libovolné pořadí nástrojů

BOHEMIA 501 Ekonom

Cena včetně DPH zahrnuje stomatologické křeslo Chirastar: **254 600,- Kč**

Je osazena kruhovým operačním svítidlem, pěti-nástrojovým stolkem na pantografu s pneumatickou brzdou a **otočným plivátkovým blokem** se skleněným plivátkem. Součástí plivátkového bloku je i panel výkonné odsávačky s hubicemi pro odsliňovač prům. 6 mm a hubicí pro odsávací koncovky prům. 11 mm. Souprava je osazena pneumatickou vývěvou jako zdrojem podtlaku pro výkonnou odsávačku. **Není tedy třeba soupravu vybavit výkonnou odsávačkou.**

Toto provedení není vybaveno separátorem amalgamu – je ale možné soupravu doplnit o externí separátor – např. sedimentační separátor Skantech (viz příslušenství). Souprava je v tomto provedení připravena pro připojení třícestné stříkačky (v ceně), světelné nebo nesevětelné turbínové hadice (v ceně je započtena nesevětelná hadice Midwest 4), světelného nebo nesevětelného mikromotoru (viz doplňkové vybavení) a odstraňovače zubního kamene nebo druhé turbíny. Maximální počet nástrojů na stolku je pět, elektricky ovládané jsou čtyři.

Toto provedení je osazeno **fóliovou klávesnicí** na stolku lékaře a sestry pro ovládání a programování křesla, napouštění sklenky, oplachu plivátka a ovládání světla.

Souprava obsahuje:

- Stolek lékaře pěti-nástrojový s dolním vedením hadic osazený stříkačkou a turbínovou hadicí Midwest
- Otočný plivátkový blok s pneumatickou brzdou
- Pantografické rameno stolku s pneumatickou brzdou
- Pantografické rameno světla
- Halogenové operační světlo malé 98010

- Skleněné plivátko
- Místo pro asistenta s odsliňovačem a odsávacími hubicemi Ø6 a Ø11
- Sada koncovek pro výkonnou odsávačku Cattani
- Výkonná pneumatická vývěva
- Křeslo Chirastar s bežešvým čalouněním
- Multifunkční nožní spínač pro ovládání křesla i soupravy
- Možno dokompletovat: separátorem amalgámu Skantech
- Volitelné osazení nástrojů, libovolné pořadí nástrojů
- Možnost volby stolku s horním vedením hadic (viz doplňkové vybavení)
- Souprava je osazena kompletem foliových klávesnic na stolku lékaře a plivátkovém bloku

BOHEMIA 501 Lux

Cena včetně DPH zahrnuje stomatologické křeslo Chirastar: 265 200,- Kč

Je osazena velkým kruhovým operačním svítidlem, pěti-nástrojovým stolkem na pantografu s pneumatickou brzdou a **otočným plivátkovým blokem** se skleněným plivátkem. Součástí plivátkového bloku je i panel výkonné odsávačky s hubicemi pro odsliňovač prům. 6 mm a hubicí pro odsávací koncovky prům. 18 mm. **Souprava je osazena odlučovačem vlhkosti Cattani a je nutno ji dokompletovat externí výkonnou odsávačkou** (viz doplňkové vybavení).

Toto provedení není vybaveno separátorem amalgámu – je ale možné soupravu doplnit o externí separátor – např. sedimentační separátor Skantech (viz příslušenství). Souprava je v tomto provedení připravena pro připojení třícestné stříkačky (v ceně), světelné nebo nesvětelné turbínové hadice (v ceně je započtena nesvětelná hadice Midwest 4), světelného nebo nesvětelného mikromotoru (viz doplňkové vybavení) a odstraňovače zubního kamene nebo druhé turbíny. Maximální počet nástrojů na stolku je pět, elektricky ovládané jsou čtyři.

Toto provedení je osazeno **foliovou klávesnicí** na stolku lékaře a sestry pro ovládání a programování křesla, napouštění sklenky, oplachu plivátka a ovládání světla.

Souprava obsahuje:

- Stolek lékaře pěti-nástrojový s dolním vedením hadic osazený stříkačkou a turbínovou hadicí Midwest
- Otočný plivátkový blok s pneumatickou brzdou
- Pantografické rameno stolku s pneumatickou brzdou
- Pantografické rameno světla
- Halogenové operační světlo velké 98011
- Skleněné plivátko
- Místo pro asistenta s odsliňovačem a odsávacími hubicemi Ø6 a Ø18
- Sada koncovek pro výkonnou odsávačku Cattani
- Odlučovač vlhkosti Cattani
- Křeslo Chirastar s bežešvým čalouněním
- Multifunkční nožní spínač pro ovládání křesla i soupravy
- Možno dokompletovat: separátorem amalgámu Skantech
- Volitelné osazení nástrojů, libovolné pořadí nástrojů
- Možnost volby stolku s horním vedením hadic (viz doplňkové vybavení)
- Souprava je osazena kompletem foliových klávesnic na stolku lékaře a plivátkovém bloku

BOHEMIA 501 Profesional

Cena včetně DPH zahrnuje stomatologické křeslo Chirastar: 307 700,- Kč

Je osazena velkým kruhovým operačním svítidlem, pěti-nástrojovým stolkem na pantografu s pneumatickou brzdou a **otočným plivátkovým blokem** se skleněným plivátkem. Toto provedení je osazeno **foliovou klávesnicí** na stolku lékaře pro ovládání a programování křesla, napouštění sklenky, oplachu plivátka a ovládání světla. Součástí plivátkového bloku je i panel výkonné odsávačky s hubicemi pro odsávací koncovky prům. 11 a 18 mm, třícestnou stříkačkou a také foliovou klávesnicí pro ovládání křesla, plnění sklenky a oplachu plivátka.

Souprava obsahuje separátor amalgámu Dürr a je nutno ji dokompletovat externí výkonnou odsávačkou (viz doplňkové vybavení).

Nástrojové vybavení je plně volitelné – soupravy lze osadit všemi běžnými stomatologickými nástroji na základě objednávky. Maximální počet elektricky ovládaných nástrojů: stolek lékaře 5, místo asistenta 2. Soupravy jsou vybaveny turbínovou hadicí Midwest4 a třícestnou stříkačkou (v ceně).

Souprava obsahuje:

- Stolek lékaře pěti-nástrojový s dolním vedením hadic osazený stříkačkou a turbínovou hadicí Midwest
- Otočný plivátkový blok s pneumatickou brzdou
- Pantografické rameno stolku s pneumatickou brzdou
- Pantografické rameno světla
- Halogenové operační světlo velké 98011
- Skleněné plivátko
- Místo pro asistenta s odsliňovačem a odsávacími hubicemi Ø11 a Ø18
- Sada koncovek pro výkonnou sačku Cattani
- Křeslo Chirastar s bezešvým čalouněním
- Multifunkční nožní spínač pro ovládání křesla i soupravy
- Komplet foliových klávesnic na stolku a plivátkovém bloku pro řízení a programování křesla
- Nutno dokompletovat externí výkonnou odsávačkou nebo připojit ke zdroji výkonného sání
- Volitelné osazení nástroji, libovolné pořadí nástrojů
- Možnost volby stolku s horním vedením hadic (viz doplňkové vybavení)

BOHEMIA 501 Profesional Travel

Cena včetně DPH zahrnuje stomatologické křeslo Chirastar: **337 190,- Kč**

Souprava je vybavena samostatným pojezdem soupravy – křeslo stojí samostatně a souprava se pohybuje tak, aby vůči křeslu měla vždy stejnou polohu. Lze tedy měnit výšku plivátka vůči křeslu, navíc tím, že souprava není spojena s křeslem, nepřenáší se na ni rušivé pohyby vzniklé pohybem pacienta na křesle. Tento pojezd je možné kombinovat se všemi variantami souprav, zrovňata se všemi typy křesel. (viz doplňkové vybavení)

Souprava je osazena velkým kruhovým operačním svítidlem, pěti-nástrojovým stolkem na pantografu s pneumatickou brzdou a **otočným plivátkovým blokem** se skleněným plivátkem. Toto provedení je osazeno **foliovou klávesnicí** na stolku lékaře pro ovládání a programování křesla, napouštění sklenky, oplachu plivátka a ovládání světla. Součástí plivátkového bloku je i panel výkonné odsávačky s hubicemi pro odsávací koncovky prům. 11 a 18 mm, třícestnou stříkačkou a také foliovou klávesnicí pro ovládání křesla, plnění sklenky a oplachu plivátka.

Souprava obsahuje separátor amalgámu Dürr a je **nutno ji dokompletovat externí výkonnou odsávačkou** (viz doplňkové vybavení).

Nástrojové vybavení je plně volitelné – soupravy lze osadit všemi běžnými stomatologickými nástroji na základě objednávky. Maximální počet elektricky ovládaných nástrojů: stolek lékaře 5, místo asistenta 2. Soupravy jsou vybaveny turbínovou hadicí Midwest4 a třícestnou stříkačkou (v ceně).

Souprava obsahuje:

- Stolek lékaře pěti-nástrojový s dolním vedením hadic osazený stříkačkou a turbínovou hadicí Midwest
- Otočný plivátkový blok s pneumatickou brzdou
- Pojezd soupravy
- Pantografické rameno stolku s pneumatickou brzdou
- Pantografické rameno světla
- Halogenové operační světlo velké 98011
- Skleněné plivátko
- Místo pro asistenta s odsliňovačem a odsávacími hubicemi Ø11 a Ø18
- Sada koncovek pro výkonnou sačku Cattani
- Křeslo Chirastar s bezešvým čalouněním
- Multifunkční nožní spínač pro ovládání křesla i soupravy
- Komplet foliových klávesnic na stolku a plivátkovém bloku pro řízení a programování křesla
- Nutno dokompletovat externí výkonnou odsávačkou nebo připojit ke zdroji výkonného sání
- Volitelné osazení nástroji, libovolné pořadí nástrojů
- Možnost volby stolku s horním vedením hadic (viz doplňkové vybavení)

BOHEMIA 501 Profesional E-control

Cena včetně DPH zahrnuje stomatologické křeslo Chirastar: **324 900,- Kč**

Souprava je vybavena novým systémem řízení a nastavení nástrojů. Tento systém ovládá jak otáčky motoru tak množství a kvalitu spraye jednotlivých nástrojů elektricky jedním regulátorem umístěným z boku stolku a tyto hodnoty si ukládá do paměti. Při opětovném použití nástroje se uložená nastavení vyvolají z paměti a nástroje se nastaví do do uloženého režimu. Tento systém významně usnadňuje nastavení nástrojů, navíc nožním pedálem lze rozhodnout, jestli nástroj bude pracovat s chlazením, nebo bez chlazení.

Souprava je dále osazena velkým kruhovým operačním svítidlem, pěti-nástrojovým stolkem na pantografu s pneumatickou brzdou a **otočným plivátkovým blokem** se skleněným plivátkem. Toto provedení je osazeno **foliovou klávesnicí** na stolku lékaře pro ovládání a programování křesla, napouštění sklenky, oplachu plivátka a ovládání světla. Součástí plivátkového bloku je i panel výkonné odsávačky s hubicemi pro odsávací koncovky prům. 11 a 18 mm, třícestnou stříkačkou a také foliovou klávesnicí pro ovládání křesla, plnění sklenky a oplachu plivátka.

Souprava obsahuje separátor amalgámu Dürr a je nutno ji dokončit externí výkonnou odsávačkou (viz doplňkové vybavení).

Nástrojové vybavení je plně volitelné – soupravy lze osadit všemi běžnými stomatologickými nástroji na základě objednávky. Maximální počet elektricky ovládaných nástrojů: stolec lékaře 5, místo asistenta 2. Soupravy jsou vybaveny turbínovou hadicí Midwest4 a třícestnou stříkačkou (v ceně).

Souprava obsahuje:

- Stolec lékaře pěti-nástrojový s dolním vedením hadic osazený stříkačkou a turbínovou hadicí Midwest
- Otočný plivátkový blok s pneumatickou brzdou
- Pantografické rameno stolku s pneumatickou brzdou
- Pantografické rameno světla
- Halogenové operační světlo velké 98011
- Skleněné plivátko
- Místo pro asistenta s odsliňovačem a odsávacími hubicemi Ø11 a Ø18
- Sada koncovek pro výkonnou sačku Cattani
- Křeslo Chirastar s bezešvým čalouněním
- Multifunkční nožní spínač pro ovládání křesla i soupravy
- Komplet foliových klávesnic na stolku a plivátkovém bloku pro řízení a programování křesla
- Nutno dokončit externí výkonnou odsávačkou nebo připojit ke zdroji výkonného sání
- Volitelné osazení nástroji, libovolné pořadí nástrojů
- Možnost volby stolku s horním vedením hadic (viz doplňkové vybavení)

BOHEMIA 501 Profesional M-control

Cena včetně DPH zahrnuje stomatologické křeslo Chirastar: **331 900,- Kč**

Souprava je vybavena novým systémem řízení a nastavení nástrojů. Tento systém ovládá jak otáčky motoru tak množství a kvalitu spraye jednotlivých nástrojů elektricky jedním regulátorem umístěným z boku stolku a tyto hodnoty si ukládá do paměti. Nastavení je zobrazeno na displeji, Konkrétní nastavení nástroje lze uložit do jedné ze tří pamětí. Při opětovném použití nástroje se uložená nastavení vyvolají z paměti a nástroje se nastaví do do uloženého režimu. Tento systém významně usnadňuje nastavení nástrojů, navíc nožním pedálem lze rozhodnout, v jakém režimu bude nástroj pracovat - s chlazením, nebo bez chlazení. Díky předvolbám je práce s nastavením nástroje ještě snadnější.

Souprava je dále osazena velkým kruhovým operačním svítidlem, pěti-nástrojovým stolkem na pantografu s pneumatickou brzdou a **otočným plivátkovým blokem** se skleněným plivátkem. Toto provedení je osazeno **foliovou klávesnicí** na stolku lékaře pro ovládání a programování křesla, napouštění sklenky, oplachu plivátka a ovládání světla. Součástí plivátkového bloku je i panel výkonné odsávačky s hubicemi pro odsávací koncovky prům. 11 a 18 mm, třícestnou stříkačkou a také foliovou klávesnicí pro ovládání křesla, plnění sklenky a oplachu plivátka.

Souprava obsahuje separátor amalgámu Dürr a je nutno ji dokončit externí výkonnou odsávačkou (viz doplňkové vybavení).

Nástrojové vybavení je plně volitelné – soupravy lze osadit všemi běžnými stomatologickými nástroji na základě objednávky. Maximální počet elektricky ovládaných nástrojů: stolec lékaře 5, místo asistenta 2. Soupravy jsou vybaveny turbínovou hadicí Midwest4 a třícestnou stříkačkou (v ceně).

Souprava obsahuje:

- Stolek lékaře pěti-nástrojový s dolním vedením hadic osazený stříkačkou a turbínovou hadicí Midwest
- Otočný plivátkový blok s pneumatickou brzdou
- Pantografické rameno stolku s pneumatickou brzdou
- Pantografické rameno světla
- Halogenové operační světlo velké 98011
- Skleněné plivátko
- Místo pro asistenta s odsliňovačem a odsávacími hubicemi Ø11 a Ø18
- Sada koncovek pro výkonnou sačku Cattani
- Křeslo Chirastar s bežešvým čalouněním
- Multifunkční nožní spínač pro ovládání křesla i soupravy
- Komplet foliových klávesnic na stolku a plivátkovém bloku pro řízení a programování křesla
- Nutno dokompletovat externí výkonnou odsávačkou nebo připojit ke zdroji výkonného sání
- Volitelné osazení nástroji, libovolné pořadí nástrojů
- Možnost volby stolku s horním vedením hadic (viz doplňkové vybavení)

Varianta souprav BOHEMIA 501	Mini	Ekonom	Lux	Profesional	Profesional Travel	Profesional E/M control
Horní vedení hadic	za doplatek	za doplatek	za doplatek	za doplatek	za doplatek	za doplatek
Počet elektricky ovládaných nástrojů na stolku	3	4	4	4	5	5
Počet elektricky ovládaných nástrojů na místě asistenta	x	x	x	2	3	3
Pojezd soupravy	x	x	x	x	•	x
Programovatelný režim nástrojů	x	x	x	x	x	•
Foliové klávesnice na stolku a místě asistenta	za doplatek	•	•	•	•	•
Programovatelné křeslo	za doplatek	•	•	•	•	•
Otočný plivátkový blok s pneumatickou brzdou	•	•	•	•	•	•
Pantografické rameno stolku s pneumat. brzdou	•	•	•	•	•	•
Pantografické rameno světla	•	•	•	•	•	•
Operační světlo malé 98010	•	•	x	x	x	x
Operační světlo velké 98011	x	x	•	•	•	•
Skleněné plivátko	•	•	•	•	•	•
Pneumatický odsliňovač se sací hubicí průměr 6mm	•	•	•	x	x	x
Pneumatická vývěva s hubicí průměr 11	x	•	x	•	•	•
Výkonná sačka průměr 18mm, nutno dokompletovat externí výkonnou odsávačkou	x	x	•	•	•	•
Sada koncovek pro výkonnou odsávačku	x	•	•	•	•	•
Odlučovač vlhkosti Cattani	x	x	•	x	x	x
Separátor amalgamu	za doplatek Skantech “	za doplatek Skantech “	za doplatek Skantech “	• „Durr“	• „Durr“	• „Durr“
Multifunkční nožní spínač	•	•	•	•	•	•

CENÍK - doplňkové vybavení a úpravy k soupravám BOHEMIA 501

Typ	Popis	Cena (Kč) bez DPH	Cena (Kč) s DPH
ZÁMĚNY	Záměna křesla Chirastar za křeslo Promed AG03	20 000	24 200
A ÚPRAVY	Záměna křesla Chirastar za křeslo Promed AG04	26 000	31 460
	Záměna křesla Chirastar za křeslo Promed Cobra	45 000	54 450
	Záměna spodního vedení hadic za horní – stolek 501	14 455	17 491
	Záměna spodního vedení hadic za horní – stolek 503	18 000	21 780
	Záměna malého světla za velké u var. Mini a Ekonom	2 820	3 412
	Oddělení stolku od soupravy - kovový pojezd stolku	8 600	10 406
	Konzole pro snížení plivátka u soupravy pro děti	2 182	2 640
	Pojezd soupravy	24 900	30 129
DOPLŇKOVÉ	Stolička Chirastar	3 300	3 993
VYBAVENÍ	Stolička Promed AG11 záda s kruhem	9 490	11 483
	Stolička Promed AG21 nastavitelná záda s kruhem	9 490	11 483
	Stolička Promed AG31 nastavitelná úzká opěrka s kruhem	8 390	10 152
	Stolička Promed AG41 úzká opěrka s kruhem	7 790	9 426
	Stolička Promed AG61 sedlo s kruhem	7 990	9 668
	Pravá opěrka pro křeslo Chirastar	3 000	3 630
	Pravá opěrka pro křeslo Promed AG03	2 000	2 420
	Pravá opěrka pro křeslo Promed AG04	3 300	3 993
	Pravá opěrka pro křeslo Promed Cobra	7 500	9 075
	Dětský podsedák - polštář Promed	3 500	4 235
	Separátor amalgámu Dürr	37 000	44 770
	Separátor amalgámu Skantech	21 000	25 410
	Komplet mokrého sání pro soupravu Lux	5 364	6 490
	Kompresor Ekom DK50S 5litrů ve skříňce	26 379	31 919
	Výkonná odsávačka Ekom DO2.1S ve skříňce	18 981	22 967
	Přídavný tácek na rameno světla	2 636	3 190
	Komplet fóliových klávesnic pro Mini, Ekonom, Lux	14 455	17 491
	Intraorální kamera s výstupem USB + monitor + držák	od 23800	od 28798
	Zvýšení počtu elektricky ovládaných nástrojů	2 500	3 025
	Turbínová hadice Midwest	940	1 137
	Turbínová hadice Midwest světelná	1 600	1 936
	Motorová hadice nesevětelná	1 000	1 210
	Motorová hadice světelná	3 050	3 691
	OZK Woodpecker	8 900	10 769

	OZK a polymerizační lampa Woodpecker	13 460	16 287
	Stříkačka na boku plivátka	1 500	1 815
KŘESLA	Křeslo Chirastar	49 000	59 290
SAMOSTATNĚ	Křeslo Promed AG03 programovatelné	69 000	83 490
BEZ			
SOUPRAVY	Křeslo Promed AG04 programovatelné	75 000	90 750
	Křeslo Promed Cobra programovatelné	94 000	113 740
SVĚTLA	Halogen malé 98011	3 500	4 235
	Halogen velké se senzorem 98011.1	6 800	8 228
	LED se senzorem 18W	9 900	11 979

Ceny jsou platné od 1.9.2015